



1 Elektroden am Gerät befestigen

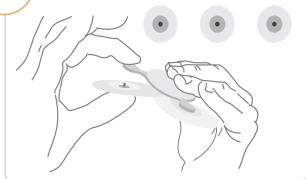


2 Plastik von den Elektroden entfernen

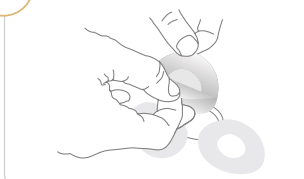

3 Gerät einschalten

Knopf drücken

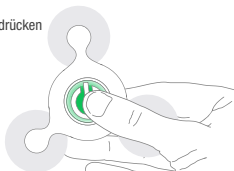


4 Gerät am Patienten anlegen

- Langsames grünes Blinklicht zeigt an, dass das Gerät korrekt am Patienten befestigt wurde und Daten aufnimmt
- Die C3 Aufnahme läuft zwischen 24 und 48 Stunden


 **Bitte beachten Sie:**
Das C3 ist nicht wasserdicht

Das C3 auf der Mediasternal-Linie platzieren

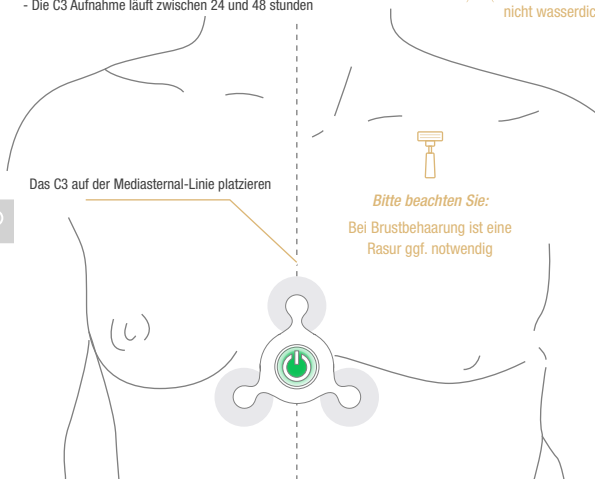

Bitte beachten Sie:
Bei Brustbehaarung ist eine Rasur ggf. notwendig

A Hinweise zu den verschiedenen LED-Farben

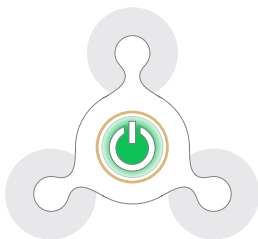

Grünes Blinklicht

- Schnell: das C3 ist angeschaltet
- Langsam: Aufnahme



Blaues Blinklicht

- Das C3 hat keinen korrekten Kontakt zur Haut



Gelbes Blinklicht

- Langsam: geringe Batterieladung
- Schnell: kein kritischer Fehler (bitte lesen Sie in der Gebrauchsanweisung nach)



Weißes Blinklicht

- Kritischer Fehler (bitte konsultieren Sie die Service-Hotline)

B Lieferumfang



C3 Aufnahmegerät



USB-Kabel



Gebrauchsanweisung

NB

Wichtiger Hinweis bei Unwohlsein!

Sobald sich Symptome bemerkbar machen oder das Gefühl von Unwohlsein auftritt, drücken Sie den Knopf

- Der Knopf leuchtet für 10 Sekunden mit grünem Blinklicht.



C Ladevorgang des C3

Bitte beachten Sie:
Lade für mindestens eine Stunde auf

