



1 Elektroden am Gerät befestigen

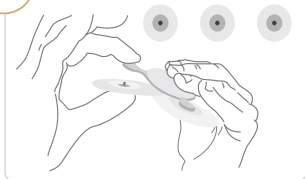


2 Plastik von den Elektroden entfernen

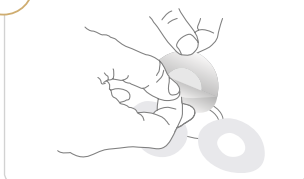

3 Gerät einschalten

Knopf drücken

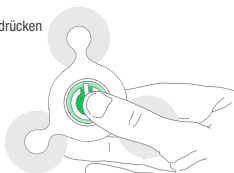


4 Gerät am Patienten anlegen

- Langsames grünes Blinklicht zeigt an, dass das Gerät korrekt am Patienten befestigt wurde und Daten aufnimmt
- Die C3 Aufnahme läuft zwischen 24 und 48 Stunden

 **Bitte beachten Sie:**
Der C3 ist
nicht wasserdicht

Der C3 auf der Mediasternal-Linie platzieren


Bitte beachten Sie:
Bei Brustbehaarung ist eine
Rasur ggf. notwendig

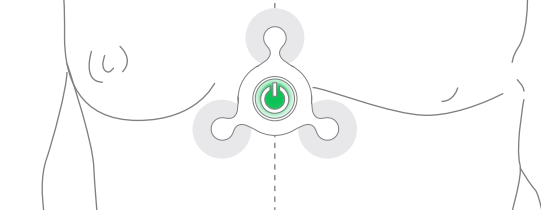

A Hinweise zu den verschiedenen LED-Farben



Grünes Blinklicht

- Schnell: der C3 ist angeschaltet
- Langsam: Aufnahme



Blaues Blinklicht

- Der C3 hat keinen korrekten Kontakt zur Haut



Gelbes Blinklicht

- Langsam: geringe Batterieladung
- Schnell: kein kritischer Fehler (bitte lesen Sie in der Gebrauchsanweisung nach)



Weißes Blinklicht

- Kritischer Fehler (bitte konsultieren Sie die Service-Hotline)

B Lieferumfang



C3 Aufnahmegerät



USB-Kabel



Gebrauchsanweisung

NB

Wichtiger Hinweis bei Unwohlsein!


Sobald sich Symptome bemerkbar machen oder das Gefühl von Unwohlsein auftritt, drücken Sie den Knopf

- Der Knopf leuchtet für 10 Sekunden mit grünem Blinklicht.



C Ladevorgang des C3

Bitte beachten Sie:
Lade für mindestens eine Stunde auf

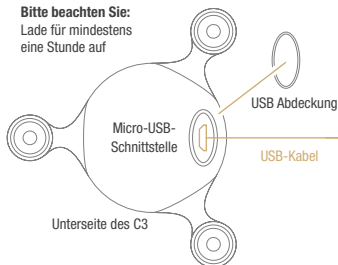

USB Abdeckung

USB-Kabel

Unterseite des C3



Hauptsteckdose