



1

Elektroden an den Elektroden
Anschlüssen befestigen.

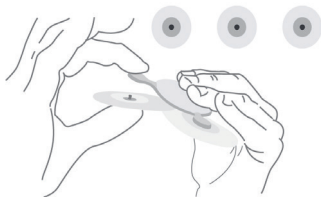


2

Schutzfolie von den Elektroden
entfernen.

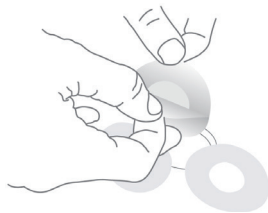

3


C3⁺ auf der Brust des Patienten
befestigen

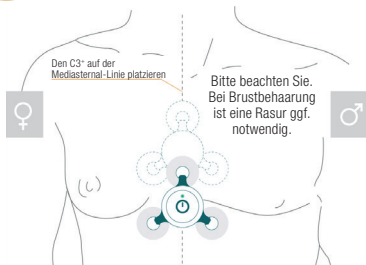

Achten Sie bitte darauf, dass die Elektroden
richtig auf der Haut haften.

4

Aufzeichnung starten

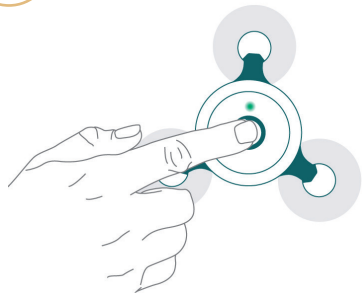

A

Druckknopf drücken

**Einmal drücken**

Einschalten / Ereignis markieren

**Zweimal drücken**


Bluetooth aktivieren

**Lange drücken (3 Sekunden)**

Ausschalten (Hinweis: Das Gerät darf keine Verbindung zum Körper haben)

B

LED-Lampe (Erklärung der Anzeige)

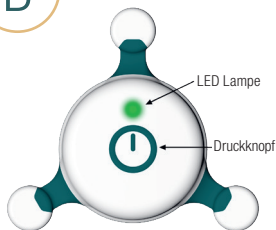**Grünes Licht**

Blinkt langsam: Aufnahme läuft

Blinkt schnell: Gerät eingeschaltet/Ereignis markiert

Leuchtet konstant: Vollständig aufgeladen

**Blaues Licht**

Blinkt langsam: Bluetooth Streaming/Verbindungsaufbau

Blinkt schnell: Kopplungsmodus über Bluetooth

**Gelbes Licht**

Blinkt langsam: Speicher ist voll

Blinkt schnell: Batterie ist schwach / Schaltet aus

Leuchtet konstant: Gerät befinden sich noch im Auflademodus

**Weißes Licht**

Blinkt schnell: Kein Signal, Elektroden haben keinen richtigen

Kontakt zum Körper.


Leuchtet konstant: Fehler, kontaktieren Sie Cortrium oder den Lieferanten.

C

Lieferumfang



C3+ Aufnahmegerät

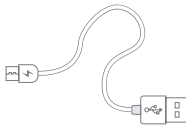

USB-Kabel



Gebrauchsanweisung

Kundensupport: www.cortrium.com | support@cortrium.com

Cortrium C3+ Holter Monitor | KURZANLEITUNG | Dokumentversion: 1.0 DE - Datum: 2019-10-14