

Cortrium Apex 1.16

Kasutusjuhend

| | |
|---|----|
| 1. Kavandatud kasutus ja hoiatused..... | 2 |
| 2. Installimine..... | 3 |
| 3. Tarkvarasse Cortrium Apex sisselogimine..... | 4 |
| 4. Valmistage C3 ⁺ uue patsiendi jaoks ette | 5 |
| 5. Holteri aruande tellimine | 7 |
| 6. Holteri aruannete ja kogu salvestise vaatamine | 9 |
| 6.1 Holteri aruannete vaatamine | 9 |
| 6.2 Salvestise vaatur | 10 |
| 6.3 Kokkuvõtte redaktor | 11 |
| 7. Patsiendi andmete muutmine ja salvestiste üksikasjade vaatamine..... | 11 |
| 8. Salvestise kustutamine | 13 |
| 9. EDF-faili allalaadimine | 14 |
| 9.1 Kuidas EDF-fail enne Holteri aruande tellimist alla laadida?..... | 14 |
| 9.2 Kuidas EDF-faili pärast aruande tellimist alla laadida? | 16 |
| 10. Cortrium Apexist väljalogimine | 17 |
| 11. Tarkvaravärskendused | 17 |
| 12. Tehnilised miinimumnõuded | 17 |
| 13. Tõrkeotsing..... | 18 |
| 13.1 „Paistab, et seade on patsiendi jaoks seadistatud...“ | 18 |

| | |
|--|----|
| 13.2 Salvestise kokkuvõte esitab teate „juhe väljas pole kohaldatav“ või „sündmused pole kohaldatavad“ | 18 |
| 13.3 Interneti-ühendus on katkenud. | 18 |
| 13.4 Apex on äsja paigaldatud, kuid see ei avane | 19 |
| 14. Turbeteave | 19 |
| 15. Märgistused ja sümbolid | 20 |
| 16. Taristu avaldus..... | 20 |

1. Kavandatud kasutus ja hoiatused

Kavandatud kasutus

Cortrium Apex on tarkvararakendus, mida kasutatakse Cortrium C3⁺ Holteri monitori ettevalmistamiseks enne kasutamist uuel patsiendil, patsiendiandmete haldamiseks, Holteri EKG-aruanne tellimiseks ja kuvamiseks, salvestise allalaadimiseks EDF-vormingus ja kogu EKG-salvestise kuvamiseks. Lisaks saab salvestise andmed alla laadida ja analüüsimiseks kolmanda osapoole tarkvarasse importida. Käesolev tarkvara ühildub järgmiste operatsioonisüsteemidega: Microsoft Windows ja MacOS (miinimumnõuete jaoks vt jaotist 12).

Ettenähtud kasutajad

Tarkvara ettenähtud kasutajad on tervishoiutöötajad, kes töötavad erakliinikutes, kliinikutes ja haiglates, samuti on see mõeldud kasutamiseks kaugtööd tegevatele tervishoiutöötajatele.

Hoiatused

- Toodet võib kasutada vaid vastavalt käesolevas juhises kirjeldatud kavandatud kasutusele.
- Toote kasutajad on kordumatud ja ei tohi mitte kunagi omavahel paroole jagada
- Tarkvarast tehtud kuvatõmmised võivad sisaldada delikaatset teavet, mistõttu peab kuvatõmmiste tegemist vältima
- Andmete jagamine süsteemist väljaspool toimub kasutaja vastutusel

2. Installimine

- a. Teid on kutsutud meili teel Cortrium Apexi tarkvara kasutama. Avage meiliga saadetud kutse arvutis, kuhu soovite tarkvara Cortrium Apex installida
- b. Parooli seadistamiseks klõpsake meili teel saabunud kutse lingil
- c. Kinnitage parool
- d. Allalaadimisega jätkamiseks valige „Liigu järgmise sammu juurde“
- e. Laadige alla Windowsi või MacOS-i jaoks mõeldud installifail
- f. Kui allalaadimine on lõpetatud, käivitage installifail
- g. Kui installimine on lõpetatud, avaneb tarkvara Cortrium Apex automaatselt
- h. Nüüd saate oma meiliaadressi ja sellele vastava parooli abil sisse logida ja tarkvara Cortrium Apex kasutama hakata

Pidage meeles, et tarkvara Cortrium Apex kasutamiseks on vaja Interneti-ühendust. Ilma Interneti-ühenduseta ei saa te tarkvarasse Cortrium Apex sisse logida ega seda kasutada



3. Tarkvarasse Cortrium Apex sisselogimine

Tarkvara Cortrium Apex kasutamiseks peavad teil kõigepealt olema kasutaja sisselogimisandmed.

Juhul kui te ei ole asutuse administraator, siis seadistab sisselogimisandmed Cortrium. Juhul kui te ei ole administraator ja teil ole veel kasutaja sisselogimisandmeid, siis aitab neid seadistada teie asutuse administraator.

Pärast seda, kui olete installinud tarkvara Cortrium Apex ja saanud sisselogimisandmed, saate jätkata järgmiste sammudega.


- Avage arvutis tarkvara Cortrium Apex, klõpsates kaks korda tarkvara Cortrium Apex ikoonil.
- Klõpsake valikul „Logi sisse“ (kui olete parooli unustanud, klõpsake valikul „Unustasin parooli“)
- Sisestage kasutajateave ja valige „Jätka“.

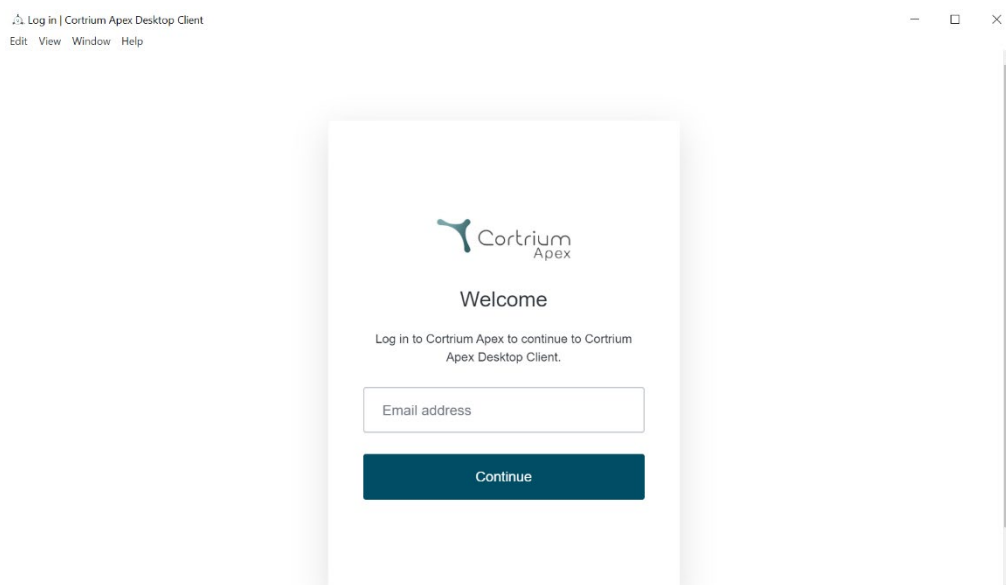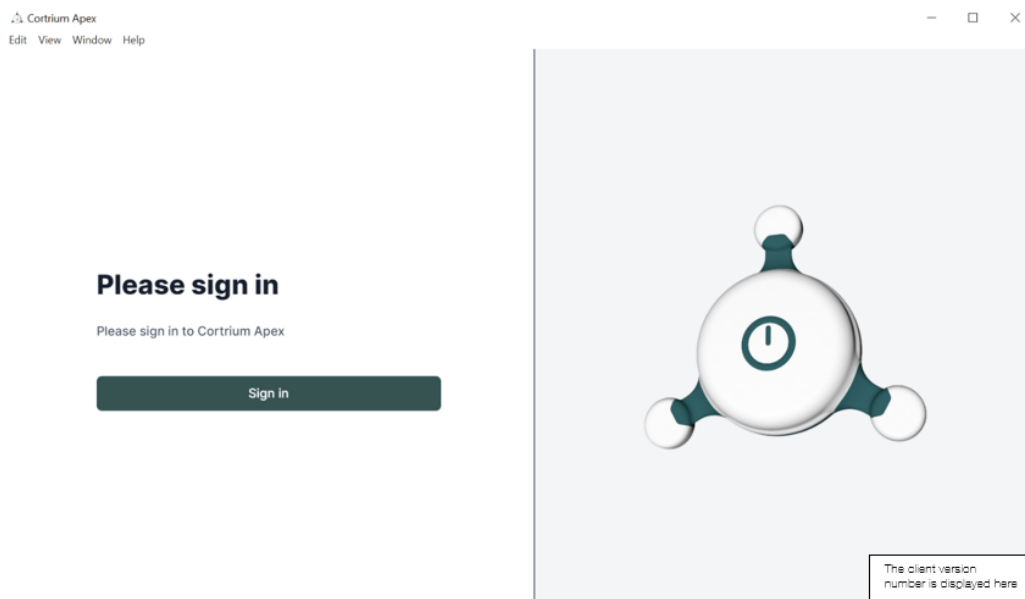


4. Valmistage C3⁺ uue patsiendi jaoks ette

Juhul kui C3⁺ on juba kasutatud pikaajalise EKG salvestamiseks, siis lugege enne käesoleva jaotise sammudega jätkamist jaotist „Holteri aruande tellimine“.

- Valige nupp „Ava seade“.

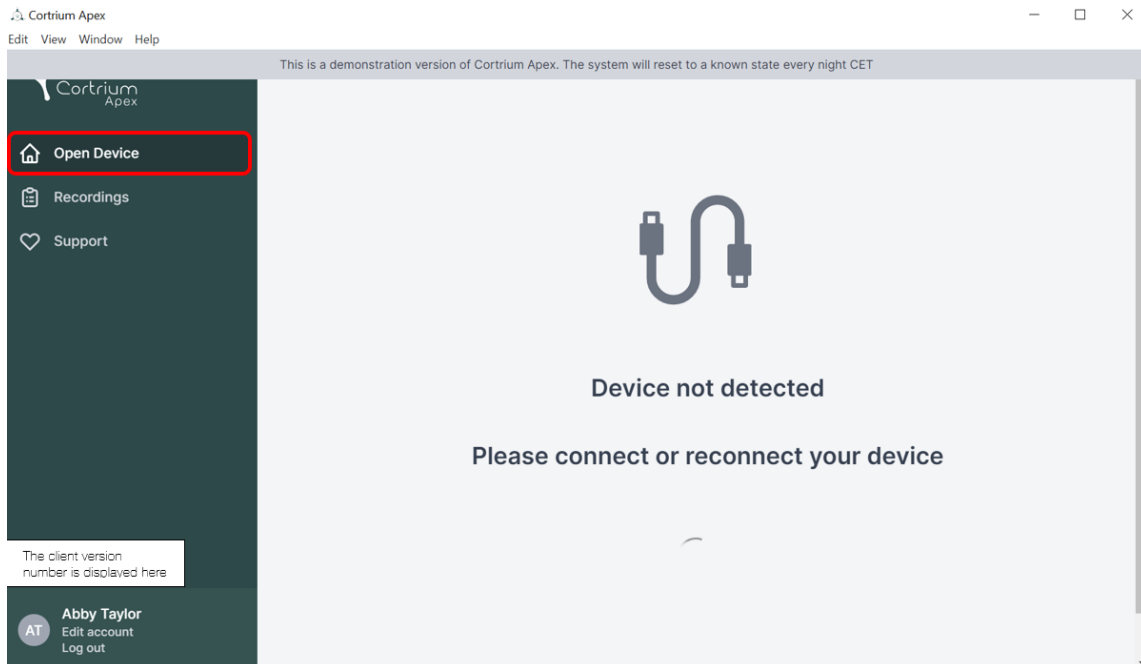


- Ühendage C3⁺ arvutiga, kasutades kaasasolevat USB-kaablit.
(Apple'i toote kasutamise korral on võimalik, et peate kasutama USB-muundurit.)
- Cortrium Apex kuvab teabe ühendatud seadme ja selles salvestatud andmete kohta.

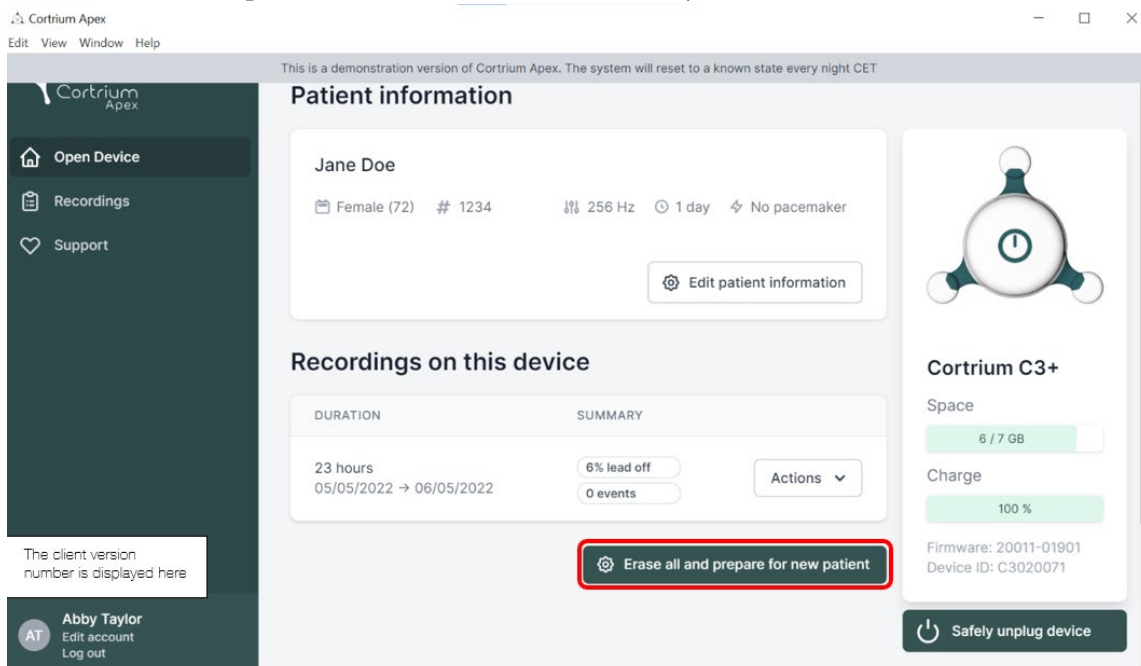

- Valige „Kustuta kõik ja valmista seade uue patsiendi jaoks ette“.
- Täitke asjakohased patsiendi ja salvestise andmed:

- nüüd klõpsake valikul „Salvesta seadmes“. Selle toiminguga kustutatakse kõik seadmes salvestatud patsiendi andmed ja salvestised ning süsteemi salvestatakse uue patsiendi teave.

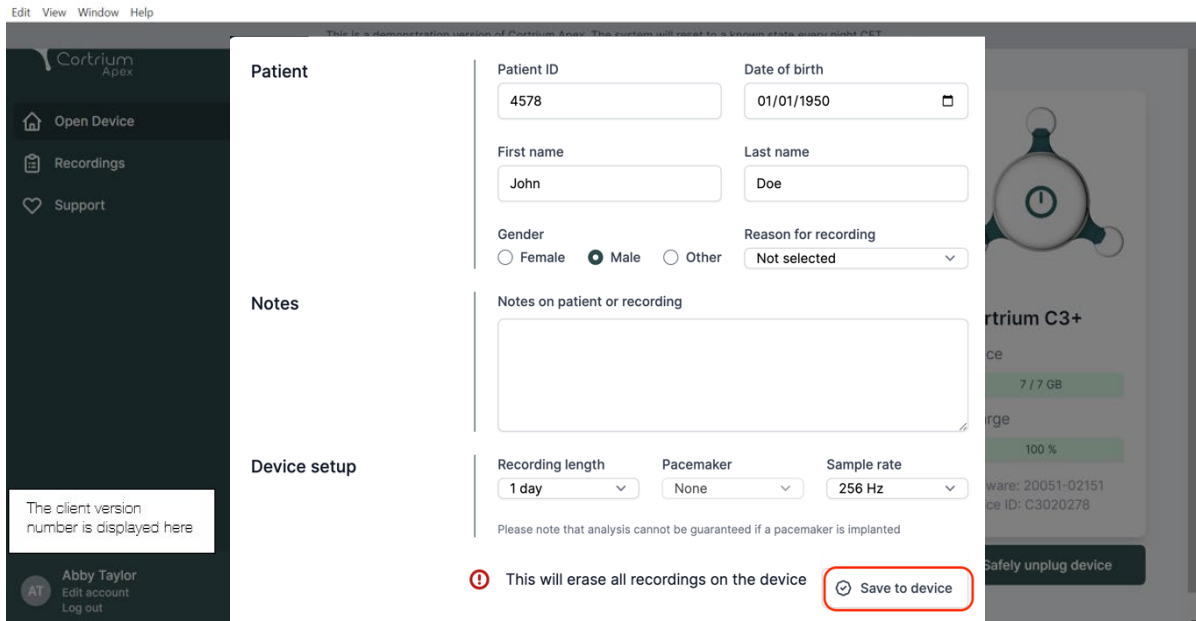

Edit View Window Help
 This is a demonstration version of Cortrium Apex. The software will revert to a known state every night (EST).

Patient
 Patient ID: 4578 Date of birth: 01/01/1950
 First name: John Last name: Doe
 Gender: ☐ Female ☒ Male ☐ Other Reason for recording: Not selected

Notes
 Notes on patient or recording

Device setup
 Recording length: 1 day Pacemaker: None Sample rate: 256 Hz
 Please note that analysis cannot be guaranteed if a pacemaker is implanted

⚠ This will erase all recordings on the device **Save to device**

The client version number is displayed here
 Abby Taylor
 Edit account
 Log out


Cortrium C3+
 7 / 7 GB
 100 %
 Software: 20051-02151
 Device ID: C3020278
 Safely unplug device

- Nüüd saate seadme ohutult eemaldada, kasutades parempoolset nuppu „Seadme ohutu eemaldamine“.
- Seadmele C3⁺ võib nüüd uue patsiendi salvestise salvestada.
- Juhul kui sisestasite valed patsiendi andmed, saate teavet muuta, klõpsates valikul „Muuda patsiendi teavet“.

5. Holteri aruande tellimine

Cortrium Apex võimaldab salvestisi analüüsimiseks edastada ja Holteri aruande kohe alla laadida, kui see on saadaval. Kui seade tagastatakse koos salvestisega, siis klõpsake nupul „Ava seade“, misjärel saate valida järgmised sammud, kasutades nuppu „Toimingud“. Vaikimisi on teil kaks järgmist võimalust.

- Holteri aruande tellimine
- EDF-failina üleslaadimine ja eksportimine

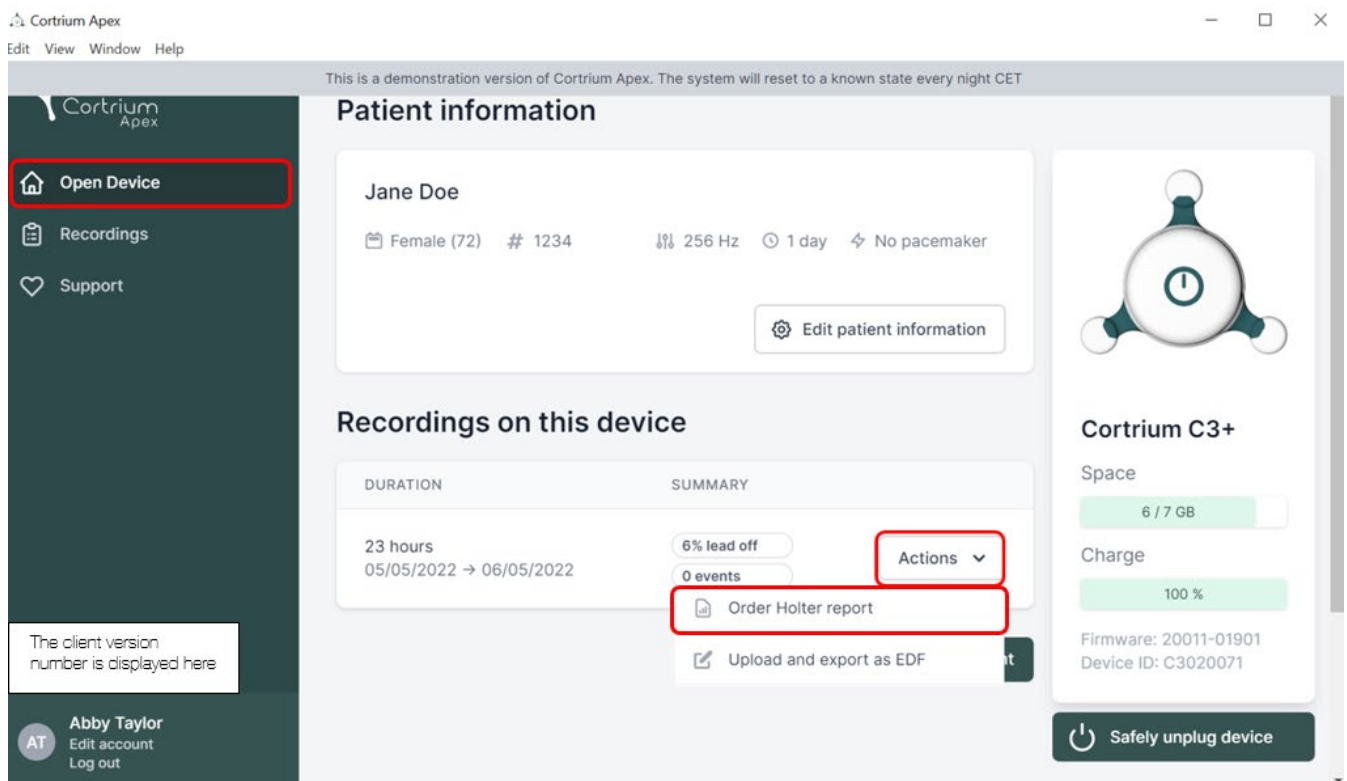


The screenshot displays the Cortrium Apex web application interface. The top navigation bar includes 'Edit', 'View', 'Window', and 'Help'. A sidebar on the left contains 'Open Device', 'Recordings', and 'Support' buttons. The main content area is titled 'Patient information' and shows details for 'Jane Doe', including gender (Female, 72), ID (# 1234), frequency (256 Hz), duration (1 day), and pacemaker status (No pacemaker). Below this, the 'Recordings on this device' section shows a recording for '23 hours' from '05/05/2022' to '06/05/2022'. The recording summary indicates '6% lead off' and '0 events'. The 'Actions' dropdown menu is open, showing 'Order Holter report' and 'Upload and export as EDF' options. The right sidebar displays device information for 'Cortrium C3+', including space usage (6 / 7 GB), charge level (100%), firmware (20011-01901), and device ID (C3020071). A 'Safely unplug device' button is at the bottom right.

Holteri aruande tellimiseks klõpsake nupul „Toimingud“ ja seejärel tellige Holteri aruanne. Seejärel laaditakse salvestis üles.

Edit View Window Help

This is a demonstration version of Cortrium Apex. The system will reset to a known state every night CET



- Open Device
- Recordings
- Support

Patient information

Jane Doe

Female (72) # 1234 256 Hz 1 day No pacemaker

Edit patient information

Recordings on this device

| DURATION | SUMMARY |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 23 hours 05/05/2022 → 06/05/2022 | 6% lead off 0 events Actions |

Cortrium C3+

Space: 6 / 7 GB

Charge: 100 %

Firmware: 20011-01901

The client version number is displayed here

Abby Taylor
Edit account
Log out

Uploading recording to Cortrium Apex for processing - please do not unplug your device

Copying recording to local folder... 12%

Pärast salvestise üleslaadimist on Holteri aruanne analüüsimiseks saadaval. Pärast salvestise üleslaadimist võib seadme uue patsiendi jaoks ette valmistada.

Sõltuvalt konto sätetest antakse teile meili teel teada, kui Holteri aruanne on vaatamiseks valmis. Lihtsa tuvastamise eesmärgil on Apex märkinud äsja loodud aruanded punase täpiga.

Järgmises jaotises on selgitatud, kuidas Holteri aruannet kohe pärast analüüsimist vaadata ja kuidas pärast üleslaadimist kogu salvestist vaadata.


6. Holteri aruannete ja kogu salvestise vaatamine

Tarkvara Cortrium Apex võimaldab vaadata Holteri aruandeid PDF-failidena, samuti on võimalik vaadata kogu salvestist kohe pärast seda, kui see on analüüsimiseks üles laaditud. Allpool on selgitatud, kuidas Holteri aruandeid vaadata. Jaotises 6.2 on kirjeldatud seda, kuidas „Salvestise vaaturit“ kasutada.

6.1 Holteri aruannete vaatamine

Pärast seda, kui salvestist on analüüsitud, saab vaadata Holteri aruannet PDF-failina.

Selleks valige menüüelement „Salvestised“ ja klõpsake soovitud patsiendil. Seejärel saate vaadata PDF-vormingus aruannet, mis on esitatud Holteri aruande jaotises viimasel real. Holteri aruanne avaneb teie veebibrauseris.

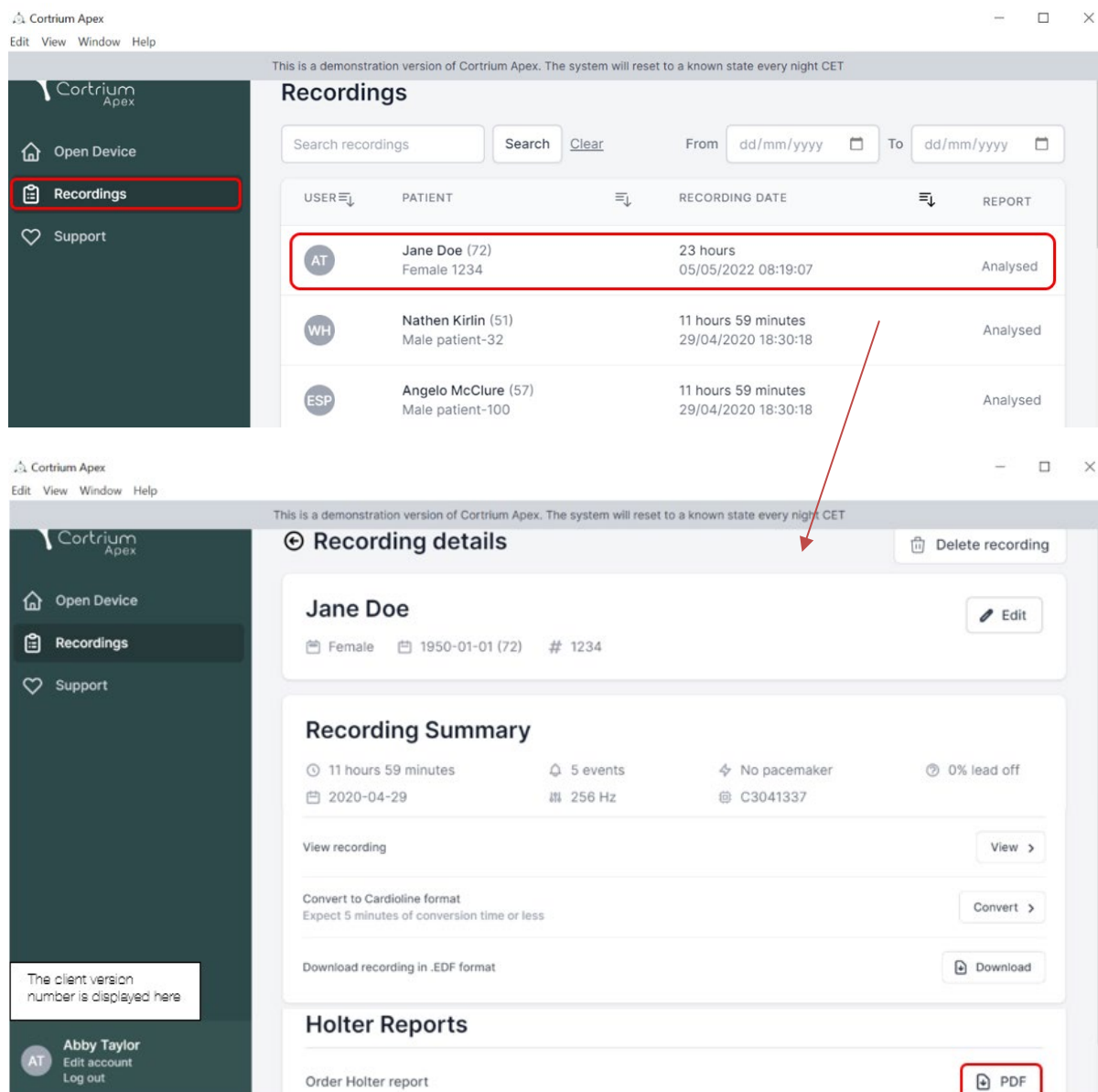

The screenshot shows the Cortrium Apex web application interface. The top navigation bar includes 'Cortrium Apex', 'Edit', 'View', 'Window', and 'Help'. A sidebar on the left contains 'Open Device', 'Recordings' (highlighted with a red box), and 'Support'. The main content area displays a table of recordings. The first row, for Jane Doe (72), is highlighted with a red box. A red arrow points from this row to the 'Recording details' view below. The 'Recording details' view shows patient information (Jane Doe, Female, 1950-01-01 (72), # 1234) and a 'Recording Summary' section. The summary includes recording duration (11 hours 59 minutes), number of events (5), pacemaker status (No pacemaker), and lead off status (0% lead off). Below the summary are buttons for 'View recording', 'Convert to Cardiolite format', and 'Download recording in .EDF format'. At the bottom, the 'Holter Reports' section has a button for 'PDF' (highlighted with a red box).

| USER | PATIENT | RECORDING DATE | REPORT |
|------|---|--|----------|
| AT | Jane Doe (72) Female 1234 | 23 hours 05/05/2022 08:19:07 | Analysed |
| WH | Nathen Kirlin (51) Male patient-32 | 11 hours 59 minutes 29/04/2020 18:30:18 | Analysed |
| ESP | Angelo McClure (57) Male patient-100 | 11 hours 59 minutes 29/04/2020 18:30:18 | Analysed |

Recording details

Jane Doe [Edit]

Female 1950-01-01 (72) # 1234

Recording Summary

- 11 hours 59 minutes
- 5 events
- No pacemaker
- 0% lead off
- 2020-04-29
- 256 Hz
- C3041337

View recording [View >]

Convert to Cardiolite format
Expect 5 minutes of conversion time or less [Convert >]


Download recording in .EDF format [Download]

Holter Reports

Order Holter report [PDF]

6.2 Salvestise vaatur

Kogu salvestise vaatamiseks pärast üleslaadimist klõpsake ja valige patsient, kelle salvestist soovite vaadata (vt jaotise 6.1 esimest kuvatõmmist). Nüüd saate kasutada salvestise vaaturit, kui vajutate nuppu „Vaata“.

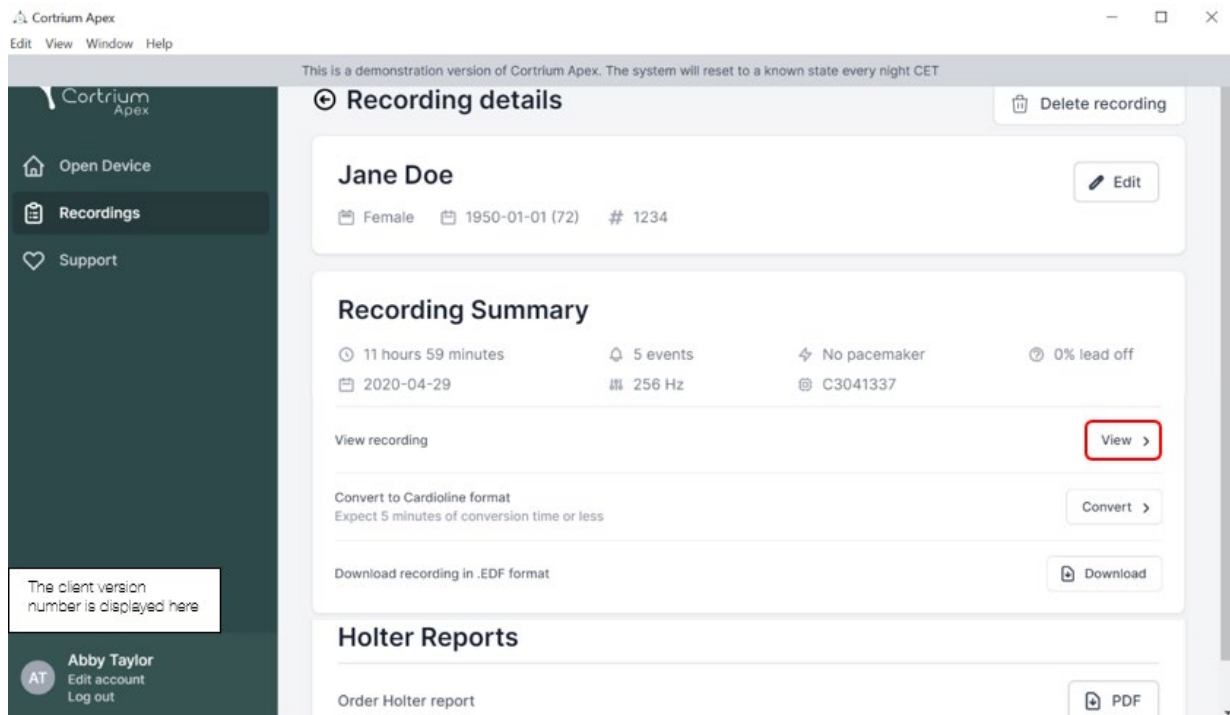


Avaneb salvestise vaatur.

- Vaatur laadib ühe minuti jagu andmeid ja näitab EKG-d seitsme sekundi jooksul.
- Tänu esiletõstetud interaktiivsetele funktsioonidele saate valida päeva, tunni, minuti ja sekundi, mida soovite salvestises vaadata. Valige aeg ja klõpsake sätte kinnitamiseks otsingufunktsioonil.
- Kui hoiate all ja lohistate vaaturi alumisel osal olevat helesinist riba, saate vaadata valitud ajapunkti ümbritsevat 60 sekundit.
- Navigeerimisnooltel klõpsates või vaadet servani lohistades saate salvestuses edasi ja tagasi liikuda.
- Kui signaaliamplituud on madal, saate seda suumi kasutades suurendada.

Recording viewer



2023-03-13 11:54 → 2023-03-14 11:55 1 day

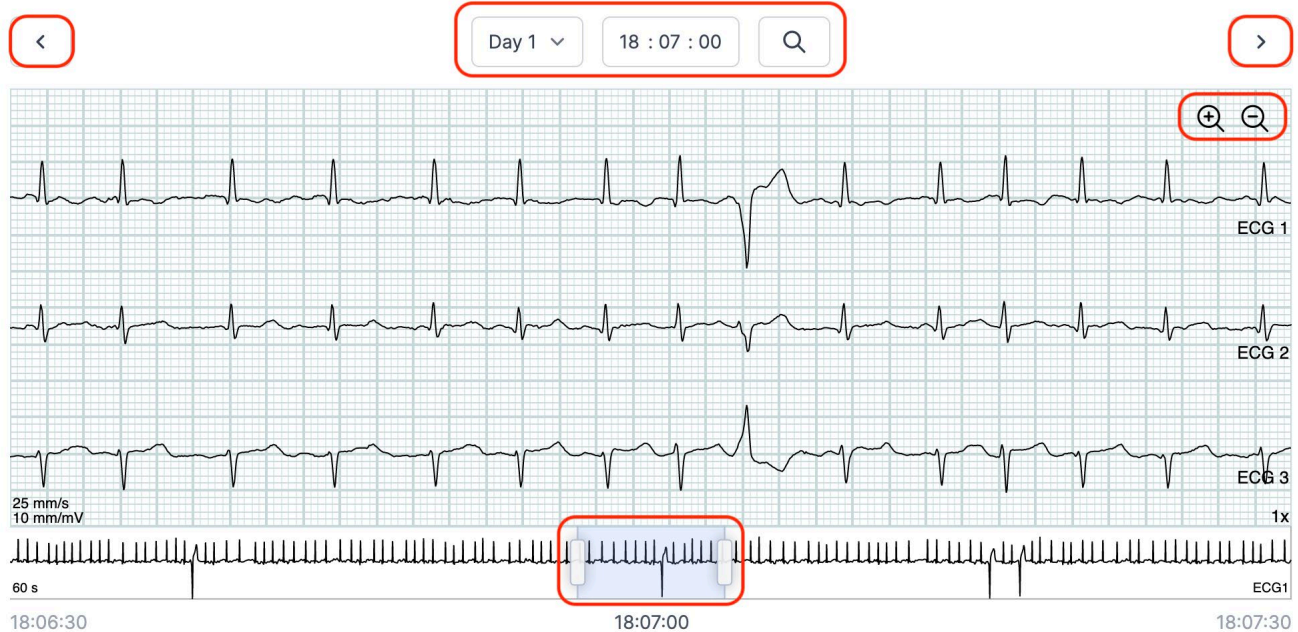

Salvestise vaaturi sulgemiseks klõpsake ülemises parempoolses nurgas olevat märki „x“.

6.3 Kokkuvõtte redaktor

Pärast aruande kättesaamist on teil võimalik kokkuvõtet muuta, kui soovite kasutada spetsiifilist sõnastust või teavet lisada.

Selleks klõpsake salvestistel ja valige patsient, kelle aruande kokkuvõtet soovite muuta.

Nüüd saate kasutada kokkuvõtte redaktorit, vajutades Holteri aruande jaotise viimasel real nuppu „Muuda aruannet“.


7. Patsiendi andmete muutmine ja salvestiste üksikasjade vaatamine

Pärast menüüelemendi „Salvestised“ valimist saate klõpsata salvestisel, et avada kokkuvõte ja seonduvad üksikasjad.


Salvestise kokkuvõte sisaldab järgmiseid üksikasju:

- salvestise kestus;
- alguskuupäev ja -aeg;
- juhtme lahtiühendus, näiteks ajavahemikud, kui elektrodid ei olnud kehaga kontaktis;


- juhtumid, kui patsient vajutas nuppu sümptomitest või vahejuhtumist märku andmiseks;
- EKG-signaali proovivõtusagedus;
- südamerütmuri teave, kui seda märgati seadme uue patsiendi jaoks ettevalmistamise ajal.

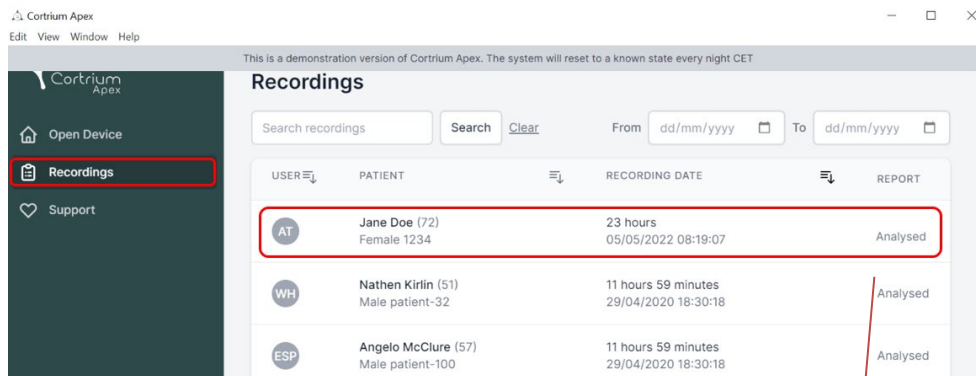

Patsiendi andmeid saab muuta, kui klõpsate nupul „Muuda“.

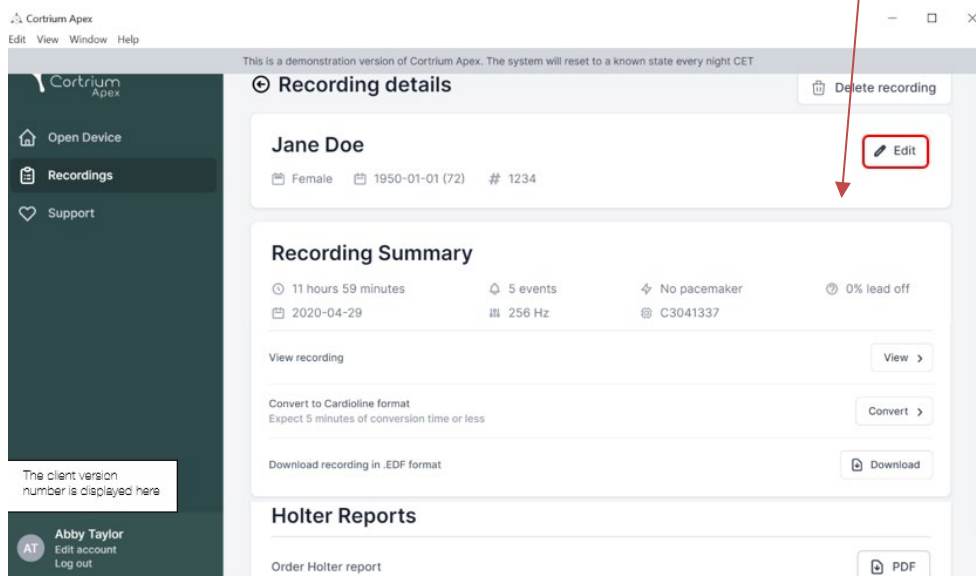


Täpsustuste salvestamiseks klõpsake nupul „Salvesta“.

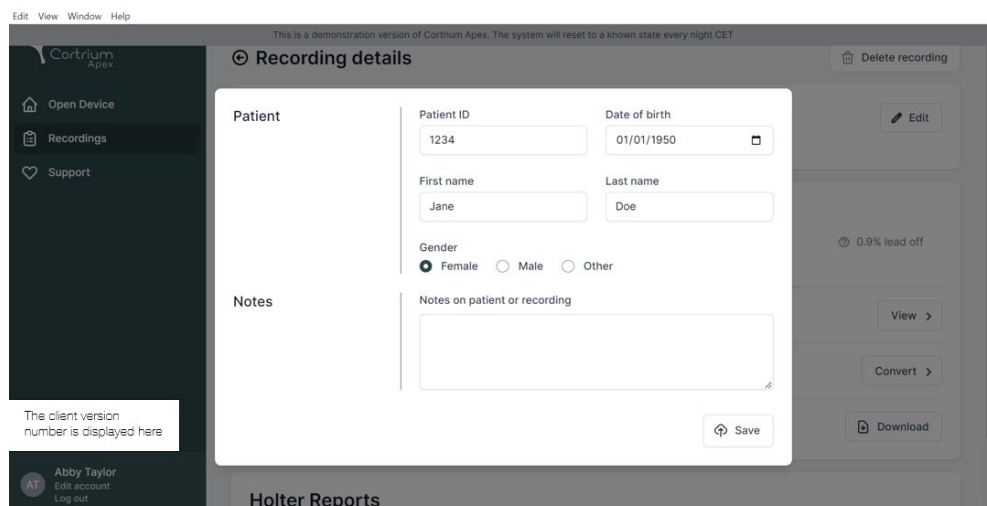

8. Salvestise kustutamine

Salvestise kustutamiseks avage jaotis „Salvestised“ ja klõpsake salvestisel, mille soovite kustutada. Seejärel klõpsake ülemises parempoolses nurgas valikut „Kustuta salvestis“. Pärast patsiendi nime sisestamist peab kustutamise kinnitamiseks vajutama valikut „Kustuta“.

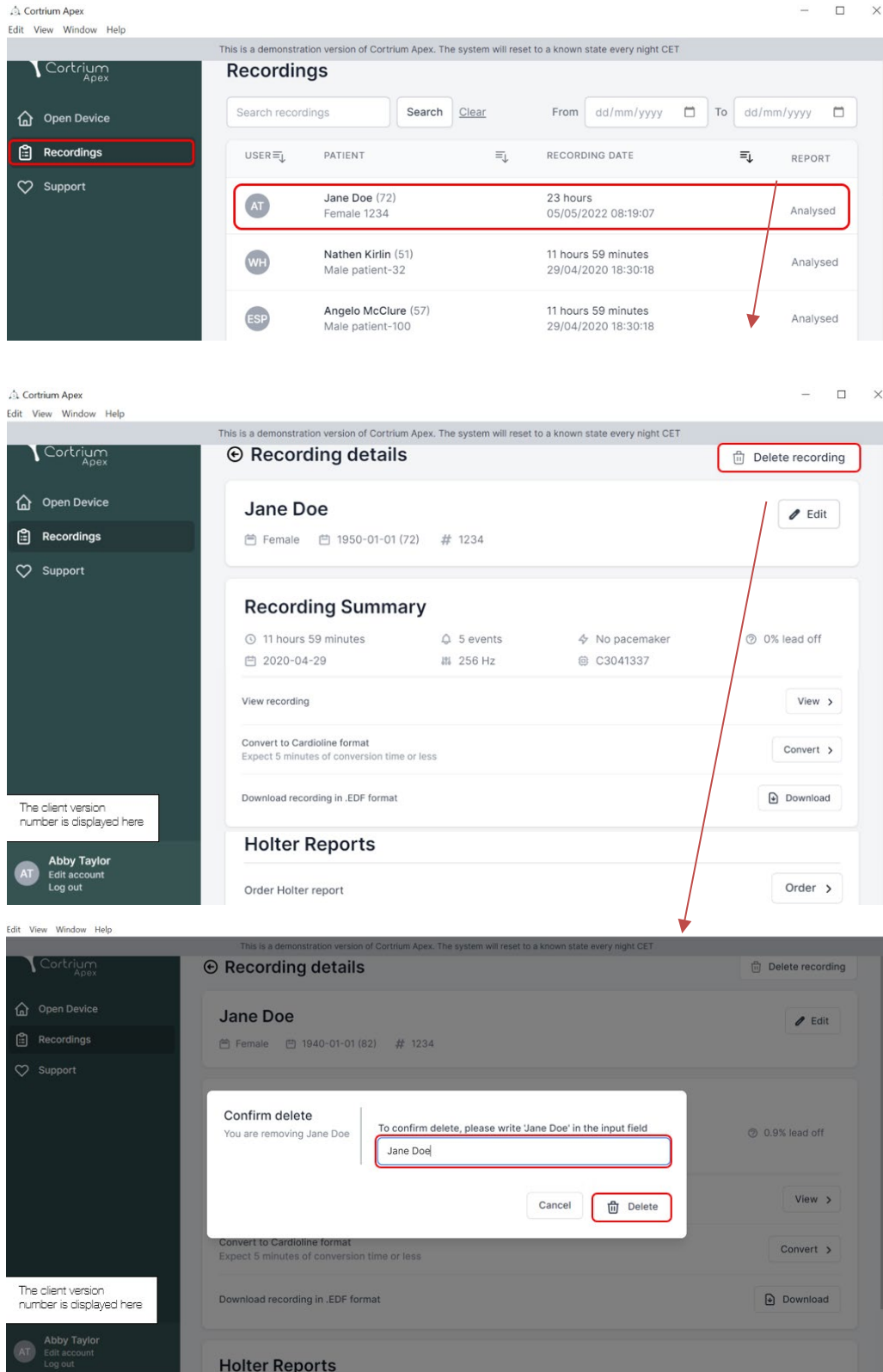

The screenshots illustrate the steps to delete a recording in the Cortrium Apex system:

- Recordings List:** The user navigates to the 'Recordings' section. A table lists recordings for Jane Doe (72), Nathan Kirilin (51), and Angelo McClure (57). The first recording for Jane Doe is highlighted with a red box.
- Recording Details:** The user clicks on the highlighted recording. The 'Delete recording' button in the top right corner is highlighted with a red box.
- Confirm delete:** A modal dialog appears asking for confirmation. The user must enter the patient's name 'Jane Doe' in the input field to confirm deletion. The 'Delete' button is highlighted with a red box.


9. EDF-faili allalaadimine

EDF-faili saab alla laadida enne või pärast Holteri aruande tellimist. Kahte erinevat võimalust kirjeldatakse järgmistes jaotistes.

9.1 Kuidas EDF-fail enne Holteri aruande tellimist alla laadida?

Järgige järgmiseid samme salvestise EDF-vormingusse teisendamiseks.


- Ühendage C3+ Holteri monitor arvutiga ja vajutage vasakpoolses menüüs nuppu „Ava seade“.
- Klõpsake nupul „Toimingud“ ja valige „Laadi üles ja ekspordi EDF-failina“.

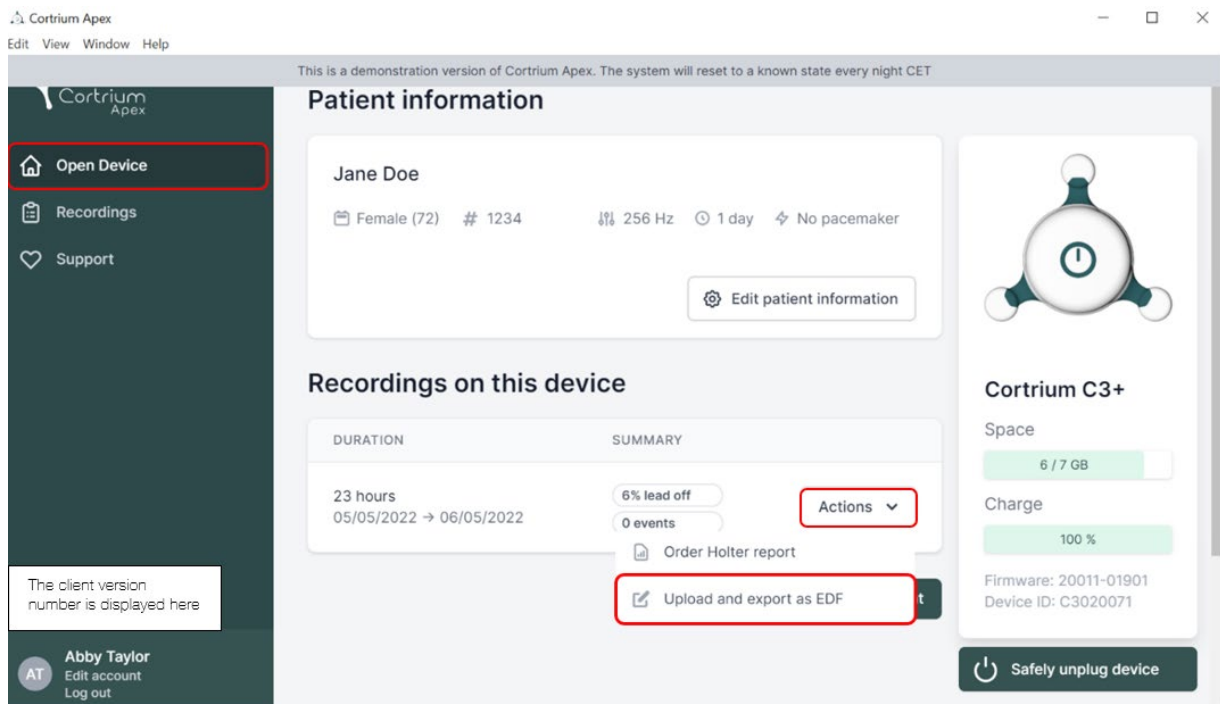

- Salvestis edastatakse Apexisse.
- Pärast seda, kui edastamine on lõppenud, muutub nupp „Toimingud“ nupuks „Vaata“.

Edit View Window Help

This is a demonstration version of Cortrium Apex. The system will reset to a known state every night CET



Open Device

Recordings


Support

Patient information

Jane Doe

Female (72) # 1234 256 Hz 1 day No pacemaker

Edit patient information



Cortrium C3+

Space 6 / 7 GB

Charge 100 %

Firmware: 20011-01901
Device ID: C3020071

Recordings on this device

| DURATION | SUMMARY | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------|
| 23 hours 05/05/2022 → 06/05/2022 | 6% lead off 0 events | Actions |

The client version number is displayed here


Abby Taylor
Edit account
Log out

Uploading recording to Cortrium Apex for processing - please do not unplug your device

Copying recording to local folder... 12%

Cortrium Apex Edit View Window Help

This is a demonstration version of Cortrium Apex. The system will reset to a known state every night CET



Open Device

Recordings


Support

Patient information

Jane Doe

Female (72) # 1234 256 Hz 1 day No pacemaker

Edit patient information



Cortrium C3+

Space 6 / 7 GB

Charge 100 %

Firmware: 20011-01901
Device ID: C3020071

Recordings on this device

| DURATION | SUMMARY | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 23 hours 05/05/2022 → 06/05/2022 | 6% lead off 0 events | View |

The client version number is displayed here


Abby Taylor
Edit account
Log out

Erase all and prepare for new patient

Safely unplug device

- Salvestise ülevaate nägemiseks klõpsake nuppu „Vaata“.
- Alapunktis „Laadi alla aruanne EDF-vormingus“ on esitatud järgmine teave:
 - Salvestise teisendamise ajal kuvatakse edenemine

- Kui EDF-fail on valmis, klõpsake nupul „Laadi alla“, et salvestada EDF-fail arvutisse

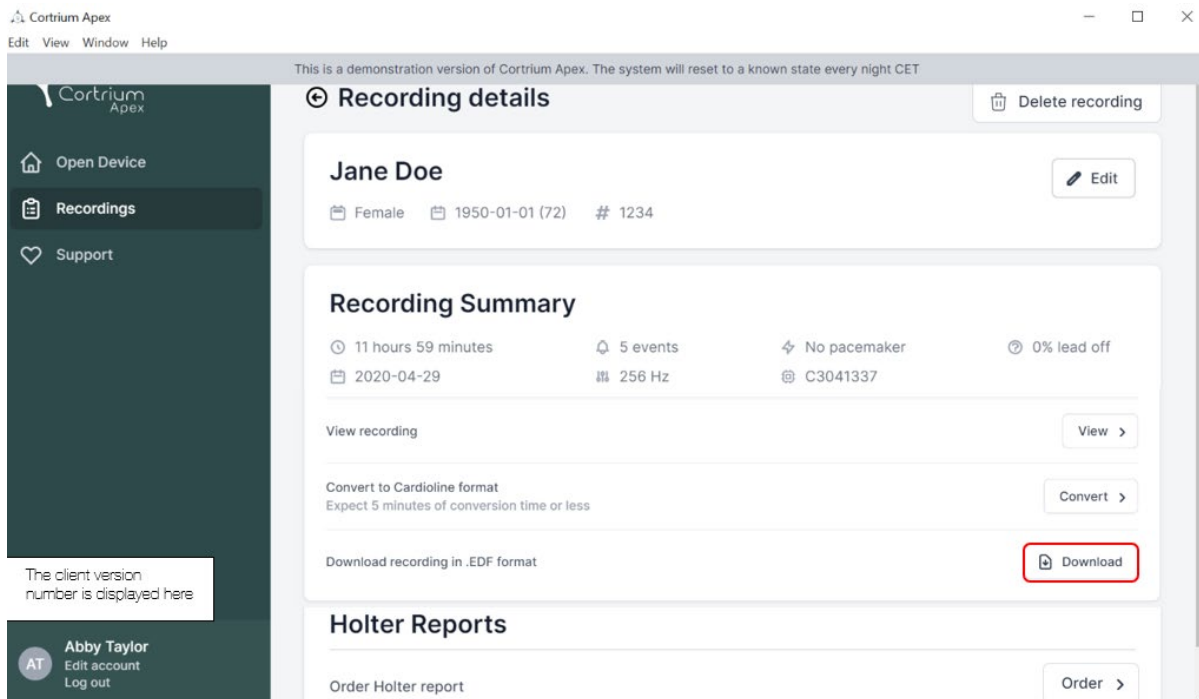


9.2 Kuidas EDF-faili pärast aruande tellimist alla laadida?

Kui olete salvestise aruande just tellinud ja soovite seejärel salvestise EDF-vormingus alla laadida, siis toimige järgmiselt.

- Kui seade on ühendatud, klõpsake menüüelemendil „Ava seade“, seejärel klõpsake salvestise kõrval asuval nupul „Vaata“.
- EDF-faili allalaadimiseks klõpsake kuval „Salvestise üksikasjad“ valikul „Laadi alla“.

Juhul kui soovite varasema salvestise EDF-vormingus alla laadida:

- klõpsake menüüelemendil „Salvestised“;
- klõpsake salvestisel, mille soovite EDF-vormingus alla laadida;
- seejärel klõpsake valikul „Laadi alla“, nagu allpool näidatud

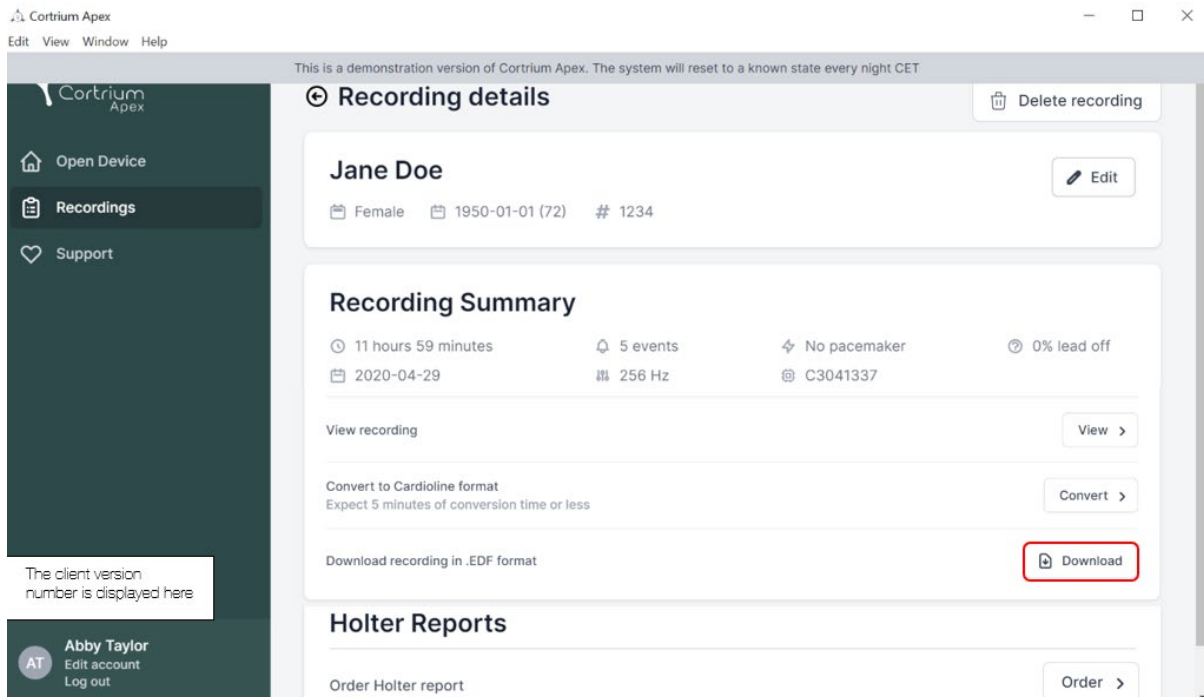

10. Cortrium Apexist väljalogimine

Oluline on meeles pidada seda, et rakendusest peab välja logima, klõpsates alumises vasakpoolses nurgas nupul „Logi välja“.

Rakendus Cortrium Apex logib teid pärast pikemat tegevusetuse perioodi kasutajakontolt automaatselt välja.

Kui teie asutuses on Cortrium Apexi tarkvara mitu kasutajat, kellel on erinevad kontod, kuid kes töötavad samas arvutis, siis ärge unustage pärast ülesannete lõpetamist Cortrium Apexist välja logida.

11. Tarkvaravärskendused

Käivitamisel kontrollib rakendus automaatselt saadaolevaid värskendusi ja installib need viivitamatult.

12. Tehnilised miinimumnõuded

Cortrium Apexi toimivuse miinimumnõuded on järgmised:

- Windows 10 või MacOS Catalina (Intel).
- 1280 x 960 piksline ekraani eraldusvõime.

- 4 GB RAM.
- 5 GB vaba kõvakettaruumi.
- Interneti-ühendus.

Cortrium Apexi kasutamiseks on vaja Interneti-ühendust. Ühenduse üleslaadimise kiirus määrab kindlaks aja, mis kulub salvestise üleslaadimiseks siis, kui tellite aruande või teisedate salvestise teise vormingusse. Allalaadimise kiirus määrab kindlaks aja, mis kulub teisendatud salvestise allalaadimiseks.

10 Mbit/s Interneti-ühendusega kulub aruande allalaadimisele ja kuvamisele tavaliselt ainult paar sekundit.

13. Tõrkeotsing

13.1 „Paistab, et seade on patsiendi jaoks seadistatud...”

Juhul kui näete järgmist hoiatust: „*Hoiatus. Paistab, et seade on patsiendi jaoks seadistatud, kuid me ei leia süsteemist patsiendi andmeid. Seadistage kirjete jaoks patsient*”,

Cortrium Apexiga kasutatava seadme seadistamiseks klõpsake lihtsalt nuppu „Lisa patsiendi andmed”.

Sellega ei kõrvaldata seadmelt kirjeid.

13.2 Salvestise kokkuvõtte esitab teade „juhe väljas pole kohaldatav” või „sündmused pole kohaldatavad”

Kui salvestise kokkuvõttes on esitatud teade „juhe väljas pole kohaldatav” või „sündmused pole kohaldatavad”, siis on see sellepärast, et ühendatud elemendi C3+ püsivara versioon ei toeta viivitamatut juhtme väljastamist või sündmuse kokkuvõtet. Salvestis on siiski kehtiv.

13.3 Interneti-ühendus on katkenud.

Juhul kui esitatakse teade „Cortrium Apex ei saa Interneti-ühendust luua”, siis on võimalik, et teie Interneti-ühendusega esinevad tõrked või see katkes. Interneti-ühenduse taastamiseks võtke ühendust oma asutuste IT-toega või Interneti-teenuse pakkujaga.

- Cortrium Apex püüab Interneti-ühendust automaatselt taastada. Esitatakse teade, mis

näitab seda, millal toimub uus ühendamise katse

- Juhul kui Cortrium Apexi käivitamisel puudub Interneti-ühendus, siis esitatakse teade, mis ütleb, et teil pole võrguühendust.
- Juhul kui edastasite Interneti-ühenduse katkemise ajal salvestist, siis on võimalik, et peate pärast ühenduse taastamist edastamise uuesti sooritama.

13.4 Apex on äsja paigaldatud, kuid see ei avane

See probleem võib tekkida tulemüüri tõttu, mis blokeerib rakenduse Cortrium Apex. Juhul kui Apex ei käivitu tulemüüri tõttu, siis veenduge, et 16. jaotises „Taristu avaldus“ esitatud URL-i lingid on blokeerimata või need on lubatud. Tugiteenuste jaoks võtke ühendust oma asutuse IT-osakonnaga.

14. Turbeteave

Kasutajate haldamine

- Iga Cortrium Apexi kasutaja peab kasutama oma isiklikku kontot. Võite luua ja kustutada nii palju kasutajakontosid kui vaja aadressil <https://apex.cortrium.com> Oluline on kindlaks määrata ja hallata seda, kellel on juurdepääs teie patsientide delikaatsetele andmetele.

Paroolid

- Veenduge, et kasutate turvalist parooli
- Kasutajanime ja/või parooli ei tohi teistega jagada
- Vältige sama parooli kasutamist mitme konto jaoks Sama parooli kasutamine võib kaasa tuua selle, et vaenulik üksus võib omandada juurdepääsu kõikidele teie süsteemidele ja arvutitele ka siis, kui ohustatud on vaid üks parool.
- Ärge unustage Cortrium Apexist välja logida Kui jääte sisselogituks omistatakse teie kontole teiste kasutajate toimingud

Krüptimine ja täiendav kaitse


Enne tarkvara Cortrium Apex installimist arvutisse soovitame järgmiseid toiminguid.

- Lubage ketta krüptimine Arvuti kadumise või varguse korral ei ole arvutis olevad delikaatsed andmed loetavad
- Automaatsete süsteemivärskenduste lubamine Suurendab võimalust, et arvuti on ajakohaste süsteemivärskendustega

- Sisseehitatud turbetarkvara lubamine (nt Windows Security), kui see on saadaval
- Tulemüür, pahavara-, andmepüügi- ja viirusetõrje on Windowsi sisse ehitatud. Soovitame selle lubada.



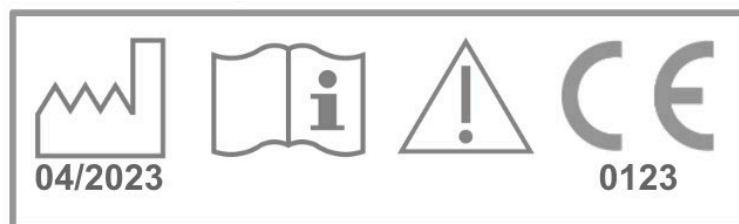

15. Märkistused ja sümbolid

Järgmisena on esitatud Cortrium Apexi märkistused ja sümbolid



UDI:(01)05745000379033(8012)1.15.0

Sildi näide

| Sümbol | Nimi | Nõue / märkus |
|---|--|-------------------|
|  | Tootmiskuupäev | ISO 15223-1 |
|  | Vt kasutusjuhendit/brošüüri | ISO 7000 - 1641 |
|  | Hoiatusmärk | ISO 7000 - 0434A |
|  | CE-tähistusega seade, millel on teavitatud asutuse identifitseerimisnumber | MDR (EU/745/2017) |

16. Taristu avaldus

Cortrium ApS teatab, et ettevõtte toode Cortrium Apex on kasutusel Microsoft Azure'i pilvandmetöötluse teenuses. Mõned URL-id sõltuvad asukohast, kus toodet kasutatakse. Allpool esitatud tabelis on esitatud süsteemis kasutatud aadressid:

| URL | Kirjeldus |
|-----|-----------|
|-----|-----------|

| | |
|--|--|
| api.apex.cortrium.com | Cortrium Apex API. |
| viewer.apex.cortrium.com | Cortrium salvestuste mängija API. |
| apex.cortrium.com | Cortrium Apexi administraatoriliides. |
| client.apex.cortrium.com | Cortrium Apexi veebiklient. |
| login.cortrium.com | Auth0 sisselogimise lõpp-punkt. |
| assets.apex.cortrium.com | Varade allalaadimine, näiteks töölauaklient. |
| support.cortrium.com | Tugiteenuste veebisait |
| cortriumukrecordingapex.blob.core.windows.net | Salvestiste bloobimälu (Ühendkuningriigi lõunaosa). |
| cortriumfrrecordingapex.blob.core.windows.net | Salvestiste bloobimälu (Prantsusmaa keskosa). |
| cortriumeurecordingapex.blob.core.windows.net | Salvestiste bloobimälu (Saksamaa lääne- ja keskosa). |
| cortriumaurecordingapex.blob.core.windows.net | Salvestiste bloobimälu (Austraalia idaosa). |
| rt.services.visualstudio.com dc.services.visualstudio.com | Kasutatakse teenuses Microsoft Azure Application Insights (telemeetria). |

Port 443 (HTTPS) peab olema avatud kõikide ülaltoodud URL-ide puhul. Selle loendi 7 esimest reeglit saab lihtsustada, kandest terve Cortriumi domeeni (*.cortrium.com) valgesse nimekirja. See vähendab ka tulevaste kohandamiste vajadust nimekirja muutumise korral.



Cortrium ApS • Erik Husfeldts Vej 7 • DK-2630 Taastrup • Denmark
Email: info@cortrium.com • Website: www.cortrium.com

Cortrium Apex UDI(01)05745000379033

